

G
U
I
D
E

Filme

KEOSAN





Customized silicone implants developed
with advanced 3D technology and
30 years of experience in implant
manufacturing technology

Let's **FI**Tme

F




T



i



m

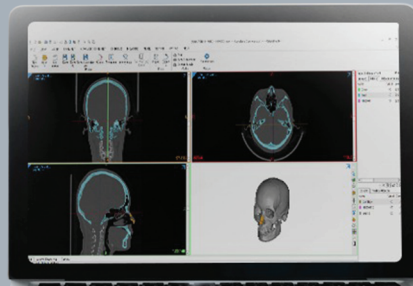

e

FITme คืออะไร

ซิลิโคนสำหรับศัลยกรรมเฉพาะบุคคลสั่งผลิตชิ้นต่อชิ้นออกแบบโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้พอดีกับคนไข้มากที่สุดดังชื่อแบรนด์ FITme สั่งผลิตได้ทุกชิ้นส่วนบนใบหน้า เช่น หน้าผาก จมูก คาง ขมับ โหนกแก้ม ร่องแก้ม และสามารถผลิตส่วนอื่นๆตามร่างกาย เช่น หน้าอกผู้ชาย ซิกแพค ท้ายทอย ต้นขา และ น่อง เป็นต้น โดยซิลิโคนทุกชิ้น ใช้วัสดุ implant grade นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและนำมาผลิต ณ ประเทศเกาหลีใต้

ซิลิโคนเฉพาะบุคคล FITme

ถูกผลิตไปแล้วกว่า 20,000 เคส FITme เป็นซิลิโคนเฉพาะบุคคล
ที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับ 1 ในประเทศเกาหลีใต้และในประเทศไทย
ผ่านการรับรองมาตรฐานสูงสุดจาก US FDA



6 ขั้นตอนการสั่งผลิต

1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบซิลิโคนร่วมกับคนไข้
2. คนไข้ CT Scan ในส่วนที่ต้องการเสริมซิลิโคน
3. ออกแบบไฟล์ 3D พร้อมจำลองการวางตำแหน่งซิลิโคน
4. คุณหมอตรวจสอบไฟล์พร้อมคอนเฟิร์มไฟล์
5. จัดส่งสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้
6. ได้รับสินค้าพร้อมผ่าตัดให้คนไข้




วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบซิลิโคนร่วมกับคนไข้


1. Consult and Fill information

คนไข้เข้าปรึกษาคุณหมอพร้อมให้คุณหมอรกรอกออเดอร์ฟอร์มเลือก "ความหนา" ของซิลิโคน
ในส่วนของคุณภาพ กว้างยาว ทางบริษัทจะอ้างอิงจากไฟล์ CT Scan เป็นหลัก โดยผลิตให้พอดี
กับโครงสร้างของคนไข้ แต่หากคุณหมอต้องการออกแบบรูปทรงหรือขนาดด้วยตนเอง
สามารถวาดรูปทรงซิลิโคนที่ต้องการ โดยระบุความกว้างยาวหนา ให้ชัดเจนได้เช่นกัน

ตัวอย่างรูปถ่ายคนไข้และออเดอร์ฟอร์มที่ต้องการ

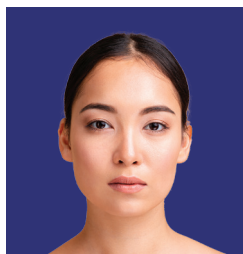


รูปถ่ายคนไข้หน้าตรง

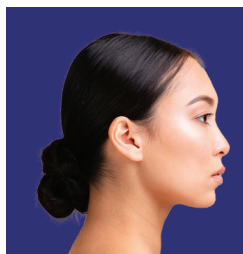

รูปถ่ายคนไข้ด้านข้าง



เฉพาะการสั่งผลิต
ซิลิโคนหน้าผาก
เพิ่มรูปวัดขนาด
หน้าผากแนวดังจาก
ไธรมถึงหัวคิ้ว (cm.)

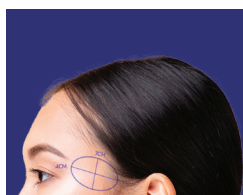

เฉพาะการสั่งผลิต
ซิลิโคนขมับเพิ่มรูป
วาดซิลิโคนระบุขนาด
เขียนบนหน้าคนไข้

วาดรูปหรือใส่ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้
ใช้ภาษาอังกฤษในการกรอกข้อมูล

ส่งข้อมูลทั้ง 2 อย่าง ให้กับทางผู้แทน

เพื่อความสะดวกคุณหมอสามารถถ่ายรูปคนไข้และรูปออเดอร์ฟอร์มส่งให้กับทางผู้แทนได้ทาง LINE
จากนั้นทางบริษัทจะรวบรวมข้อมูลรูปและไฟล์ CT Scan ส่งให้ทาง FITme ประเทศเกาหลีใต้ผลิตซิลิโคนต่อไป

สรุปข้อมูลที่ใช้ในการผลิตซิลิโคนเฉพาะบุคคล FITme



รูปถ่ายคนไข้



ออเดอร์ฟอร์ม



CD หรือไฟล์ Dicom
ข้อมูล CT Scan



คนไข้ CT SCAN ส่วนที่ต้องการเสริมด้วยซิลิโคน

2. Patient CT Scan

หลังจากที่ถ่ายรูปแล้วกรอกออเดอร์ฟอร์มแล้วทางคุณหมอต้องนัดหมายกับคนไข้เรื่องการ CT Scan หากตกลงเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งนัดหมายกับทางผู้แทนเพื่อจองนัดหมายการ CT Scan

นางสาว รัตติกาล รุ่งเจริญกิจ นัดหมาย CT Scan หน้าผาก
ที่ศูนย์ MRI ประชาชื่น วันที่ 21 ธันวาคม เวลา 13:00น.
เบอร์คนไข้ 094-558-8566

ได้รับคุณหมอทางผมจะประสานงานเพื่อนัดหมายให้ครับ

โดยในวันเข้ารับการ CT Scan คนไข้ต้องพกบัตรประชาชนตัวจริง และใบส่งตัวจากคลินิก พร้อมชำระเงินค่า CT Scan ด้วยตนเอง หลังจาก CT Scan คนไข้ต้องรอรับ CD เพื่อส่งมาให้บริษัทฯต่อไป
สถานที่จัดส่ง บริษัท เคโอซาน (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์
พระราม9-รามคำแหง ยูนิต 1 ชั้นที่ 18 ห้อง 1801 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 096-884-6756

*** สถานที่ CT Scan Facail Bone สามารถสอบถามได้จากผู้แทน**

ตั้งค่าเครื่อง CT Scanning Patameters

Matrix	Width	512px or 1024px
	Height	512px or 1024px
Slice thickness		0.6mm~ 0.75mm
Feed per rotation		1.0mm
Reconstructed slice increment		0.5 mm or less
Reconstruction algorithm		Standard
Gantry tilt		0°
Number of slices		510 pieces or more
Pixel size		0.5 mm or less
Dicom Standard 3.0		


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 096-884-6756




ออกแบบไฟล์ 3D พร้อมจำลองการวางตำแหน่งซิลิโคน

3. Design Silicone Implant


กรณีข้อมูลครบถ้วนแล้วทางบริษัทจะส่งข้อมูลให้ทางบริษัท ณ เกาหลีใต้ผลิตซิลิโคนต่อไป
โดยใช้เวลาออกแบบไฟล์ประมาณ 7 วัน

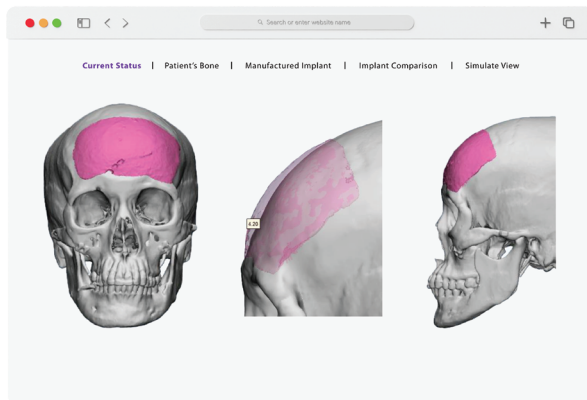


โปรแกรมจะแสดงซิลิโคนเท่าที่เคาะเสริมให้เห็นพร้อมระบุความหนา

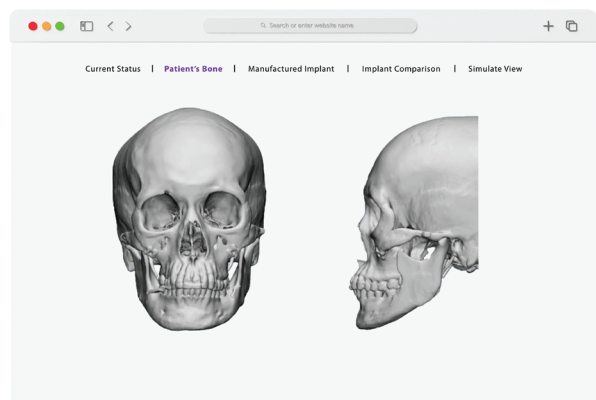


เห็นโครงสร้างกะโหลกโดยใช้โปรแกรมลบซิลิโคนโดยไม่ต้องผ่าออก

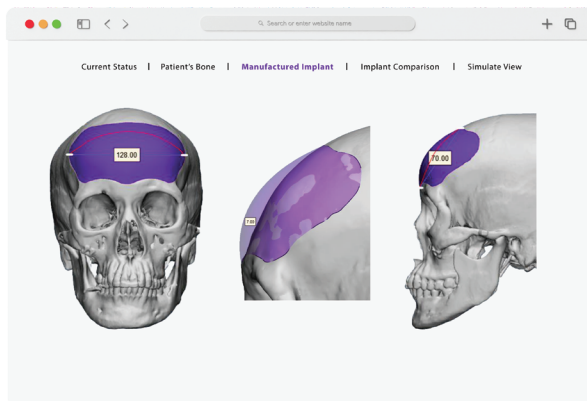


ผู้เชี่ยวชาญออกแบบขนาดซิลิโคนให้พอดีกับหน้าผาก
และเพิ่มความูนให้ตรงตามที่คุณหมอกรอกในออดิเตอร์ฟอร์ม

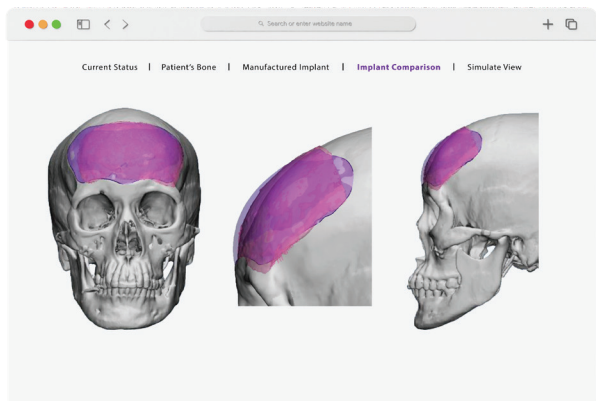

ภาพเปรียบเทียบระหว่างซิลิโคนเก่ากับซิลิโคนใหม่
ซ้อนกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

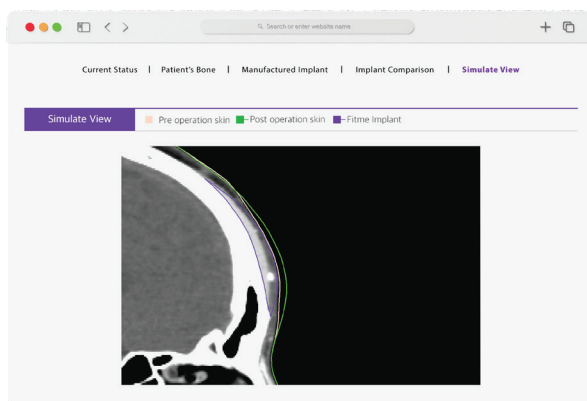

จำลองเส้นความูนจริง เปรียบเทียบก่อน-หลัง
ศัลยกรรมเสริมหน้าผากด้วยซิลิโคน

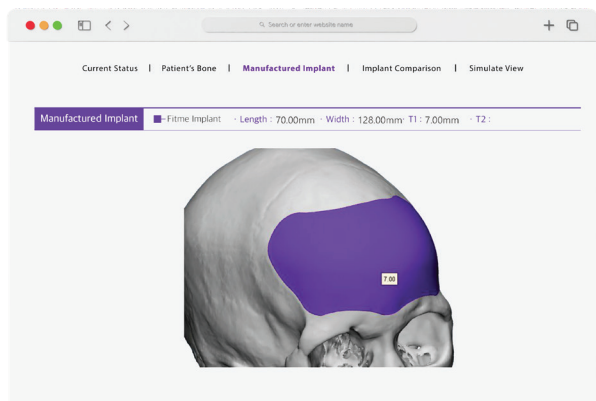

ภาพรวมสรุปขนาดซิลิโคนหน้าผากเฉพาะบุคคล FITme
ที่ระบุความกว้าง + ยาว + ูน โดยความูนจะวัดจาก
จุดที่หนาที่สุดของซิลิโคนชิ้นนั้นๆ



ตรวจสอบหรือแก้ไขพร้อมคอนเฟิร์มไฟล์

4. Confirm File Check

หลังจากที่ออกแบบไฟล์เสร็จทางผู้แทนจะส่งไฟล์เช็คให้คุณหมอฟันทางไลน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากพอใจในการออกแบบสามารถแจ้ง”คอนเฟิร์มการผลิต”กับทางผู้แทนเพื่อออกแบบซิลิโคนต่อไป กรณีต้องการแก้ไขไฟล์สามารถแจ้งแก้ไขหรือวาดรูปผ่านไฟล์ภาพตามที่ต้องการแล้วส่งกลับให้ทางผู้แทนดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยการแก้ไขไฟล์ออกแบบใช้เวลาเพิ่มเติมประมาณ 3-5 วัน
หมายเหตุ หลังจากคอนเฟิร์มไฟล์ สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 14 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)
หากมีการแก้ไขไฟล์ต้องใช้เวลาเพิ่ม 3-5 วันในการออกแบบไฟล์ใหม่เพื่อให้ตรวจสอบอีกครั้ง



จัดส่งสินค้าจากประเทศเกาหลีใต้

5. Product Shipping From Korea

หลังจากคอนเฟิร์มไฟล์ ภายใน 14 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) สินค้าจะถูกจัดส่งจากประเทศเกาหลีใต้ โดยจะถูกจัดส่งฟรีโดยแมสเซนเจอร์ ในเฉพาะพื้นที่การจัดส่งในกรุงเทพมหานคร ตามเขตที่กำหนด กรณีจัดส่งนอกเขตที่กำหนดหรือต่างจังหวัดจะถูกจัดส่งฟรีโดยไปรษณีย์ไทย
หมายเหตุ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้จากผู้แทน



ได้รับสินค้าพร้อมผ่าตัดให้คนไข้

6. Surgery

หากคุณหมอได้รับซิลิโคนเฉพาะบุคคลไปแล้วโปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของคนไข้ที่บริเวณข้างกล่องสินค้า ก่อนที่จะแกะสินค้า โดยซิลิโคนเฉพาะบุคคล FITme ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วสามารถฉีกซองเสริมให้คนไข้ได้ทันที หรือสามารถฆ่าเชื้อซ้ำได้อีกครั้ง โดยวิธีการฆ่าเชื้อสามารถดูได้จากคู่มือภายในกล่องสินค้า



การรับประกัน FITme Guarantee Card



ใบรับประกันให้กับคนไข้ FITme ทุกคน

ทางบริษัทฯ จะผลิตซิลิโคนชิ้นใหม่ให้กับคนไข้ หากพบว่าซิลิโคนผลิตมาไม่พอดังจนทำให้เกิดการเคลื่อนตัว ซิลิโคนเสริมแล้วบวมอักเสบหรือผิดรูป โดยระยะเวลาการรับประกันภายใน 1 ปี ภายหลังการผ่าตัด



ผ่านมาตรฐานสูงสุด *US FDA* จาก USA



KFDA

ผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ประเทศเกาหลีใต้



GMP

ผ่านมาตรฐานการผลิตสินค้า
และความปลอดภัย



ISO13485

ผ่านมาตรฐานโรงงาน
ระดับสากล



INNOBIZ

ใบสิทธิบัตรได้รับอนุญาต
จำหน่ายซิลิโคนเฉพาะบุคคล
เจ้าแรกในประเทศเกาหลีใต้

ผลิตแม่พิมพ์เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตซิลิโคนหน้าผาก

โดยวิธีนี้ไม่ต้อง CT Scan แต่ต้องมีโมเดลปูนบริเวณหน้าผากของคนไข้เป็นแม่แบบเพื่อผลิตซิลิโคนเฉพาะบุคคล
มีขั้นตอนหลักๆอยู่ 3 ขั้นตอน


1. หล่อแม่พิมพ์หน้าผากด้วยผงพิมพ์ฟัน
2. หล่อฐานแม่พิมพ์ด้วยปูนทั่วไป
3. หล่อโมเดลหน้าผากด้วยปูนชนิดแข็งพิเศษ



วิธีอีวีวิธีการหล่อ
โมเดลหน้าผากด้วยปูน



ช่องทางการสั่งซื้อปูน
ปูนหินเหลือง / ปูนพลาสติก
ปูนSuperstone / ผงพิมพ์ฟัน
สอบถามได้จากผู้แทน

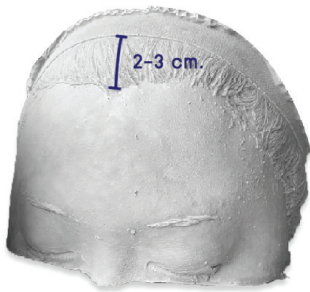

โมเดลปูนที่สมบูรณ์แบบมีความหนาที่เหมาะสม เห็นไร้มกกว้าง 2 ซม.
มีคิ้วทั้ง 2 ข้าง และ ขมับทั้ง 2 ข้าง ไม่มีรอยร้าวหรือแตกหักบริเวณหน้าผาก
โปรดเขียนชื่อ-สกุลคนไข้และชื่อคลินิกเป็นภาษาอังกฤษด้านหลังโมเดลปูน
จำเป็นต้องห่อกันกระแทก 3-4 ชั้นระบุข้อความ“ระวังแตก”หน้ากล่องพัสดุ
สถานที่จัดส่ง

บริษัท เคโอซาน (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 51อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์
พระรามเก้า-รามคำแหง ยูนิต 1 ชั้น 18 ห้อง 1801 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เบอร์ติดต่อ 096-884-6756

* หากโมเดลปูนได้รับความเสียหายหรือแตกหักทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

ข้อแตกต่างระหว่าง Casting Mold vs CT Scan



Casting Mold เหมาะกับเคสเสริมใหม่เท่านั้น

คนไข้ที่เคยเสริมหน้าผากมาก่อนหรือเคยฉีดไขมัน, ฟิลเลอร์, หน้าผากผิดรูป
หรือเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าผากจะไม่สามารถใช้วิธีหล่อปูน Casting Mold ได้
และไม่สามารถเห็นไฟล์ซิกหรือแก้ไขไฟล์ได้จะสามารถผลิตตามรูปทรงหน้าผาก
และความนูนตามที่ระบุในอเดอร์ฟอร์มเท่านั้น



CT Scan เหมาะกับทุกเคส

เนื่องจาก CT Scan จะได้เห็นโครงสร้างภายในที่ชัดเจน สามารถเห็นสารเคลือบ
หรือซิลิโคนที่เคยเสริมมาได้ และสามารถผลิตไฟล์ซิก 3D และแก้ไขได้ก่อนผลิต
ซึ่งเป็นวิธีที่แนะนำในการเลือกเสริมหน้าผากเฉพาะบุคคล FITme

UNIQUE IMPLANT ONLY FOR YOU



ซิลิโคนหน้าผาก

ซิลิโคนขมับ

ซิลิโคนจมูก

ซิลิโคนโหนกแก้ม

ซิลิโคนร่องแก้ม

ซิลิโคนคาง

ซิลิโคนกราม

FAQs FITme Customized Silicone Implant

อยากสั่งผลิตซิลิโคนเฉพาะบุคคล FITme ส่วนอื่นๆในร่างกายได้ไหม?

สามารถถ่ายรูปคนไข้ในส่วนที่ต้องการเติมเต็มด้วยซิลิโคนส่งให้ทางผู้แทนตรวจสอบได้
หากสามารถผลิตได้คุณหมอสามารถให้คนไข้ไป CT Scan ในส่วนที่ต้องการเติมเต็ม
จากนั้นทางทีมงานเกาหลีจะออกแบบและส่งไฟล์ชี้คให้คุณหมอดูตรวจสอบก่อนผลิตจริง

การผลิตซิลิโคนเฉพาะบุคคล FITme มีความแม่นยำมากน้อยเพียงใด?

โดยพื้นฐานการผลิตซิลิโคนเฉพาะบุคคล FITme จะอ้างอิงจากฐานกระดูกคนไข้เป็นหลัก
ใช้ข้อมูลไฟล์ CT Scan จากคนไข้ซึ่งการผลิตมีความแม่นยำ 99%

หากเสริมซิลิโคนเฉพาะบุคคล FITme ไปแล้วเกิดปัญหาต้องทำอย่างไร?

คนไข้ต้องไป CT Scan เพื่อตรวจสอบตำแหน่งการวางซิลิโคนว่าตรงพอดีกับโครงสร้างกระดูกคนไข้หรือไม่
หรือขณะใส่ซิลิโคนมีการพับ ม้วน หรือ ตำแหน่งไม่พอดี อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ แต่ในกรณีที่ปัญหา
เกิดจากซิลิโคนที่ออกแบบมาไม่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทฯ จะดำเนินการผลิตซิลิโคนให้ใหม่

อยากวางซิลิโคนให้ตรงตำแหน่งที่สุดต้องทำอย่างไร?

แนะนำให้ผ่าตัดด้วยกล้องเพื่อความแม่นยำในการวางตำแหน่งซิลิโคนได้พอดีที่สุด โดยในเคสที่ใช้กล้องร่วมด้วย
ในการผ่าตัด 100% ไม่เกิดปัญหาหลังจากเสริมซิลิโคนเฉพาะบุคคล FITme

สามารถยกเลิกการสั่งซื้อหลังซิลิโคนถูกผลิตไปแล้วได้หรือไม่?

ในกรณียกเลิกหากซิลิโคนถูกผลิตแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

เคยสั่งผลิตซิลิโคน FITme อยากเสริมส่วนอื่นบนใบหน้าต้อง CT Scan ใหม่ไหม?

ไฟล์ CT Scan ของคนไข้ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลไว้ 1 ปี ในกรณีที่ต้องการเสริมส่วนอื่นๆบนใบหน้า สามารถใช้ไฟล์
CT Scan เดิมได้ โดยกรอกข้อมูลออเดอร์ฟอร์มใหม่ และรูปถ่ายคนไข้ปัจจุบัน ส่งให้ทางผู้แทนเพื่อผลิตซิลิโคนชิ้นใหม่



3D Customized Silicone Implant

บริษัท เคโอซาน (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม9-รามคำแหงยูนิต 1

ชั้นที่ 18 ห้อง 1801 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 096-884-6756